

Comment faire un prélèvement mycologique par la technique du carré de moquette ?

Cette technique est **la plus simple et la plus fiable** en mycologie usuelle. Cependant, la culture sera négative si le prélèvement n'est pas correctement réalisé. Il est donc capital de suivre scrupuleusement la procédure.

Indications : Toute mycose cutanée superficielle en particulier les Teignes.

Principes : Spores et filaments de champignons (et levures) sont emprisonnés par les « fibres » d'un carré de moquette, stérilisé, frictionné sur la peau. Celui-ci permet ensuite l'ensemencement des cultures.

Mode opératoire

1 – Déballer délicatement le carré de moquette du papier d'aluminium et le saisir par les côtés.



2 – Frotter le côté « fibres » sur la peau de l'animal :

- **Suspicion clinique** : uniquement sur les lésions (frottement énergique sur les lésions croûteuses)
- **Suspicion de portage** : sur l'ensemble du corps (insister sur la face, les oreilles, les extrémités, la région périnéale)



3 – Placer des poils sur le papier aluminium avant de reposer le carré de moquette, côté fibre sur l'aluminium, et de replier l'emballage minutieusement par-dessus.



4 – Insérer le prélèvement dans le sachet plastique après avoir complété l'étiquette et fermer le zip.

Le sachet est placé dans une enveloppe jointe avec :

- la feuille de commémoratifs complétée
- le chèque (ou preuve de virement) du montant de l'analyse demandée

